


*AnyRidge
Hangs Anywhere*

Протокол сверления для коротких имплантатов Эниридж MF



Протокол сверления для коротких имплантатов Эниридж MF






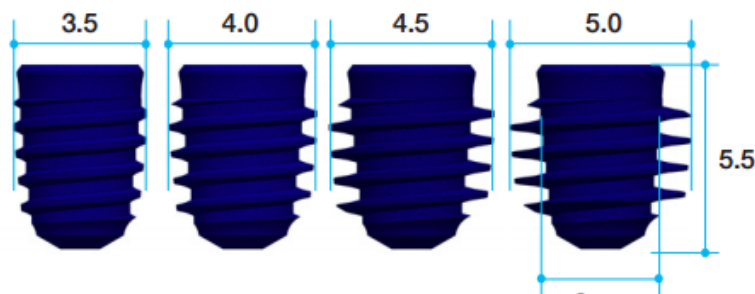









Profile Diameter	Core	Ref.C
Ø3.5	3.3	MX3505
Ø4.0		MX4005
Ø4.5		MX4505
Ø5.0		MX5005















Для установки сверхкоротких имплантатов следует использовать специальный набор сверел:

- В кости D1-D2 финальное сверло должно соответствовать диаметру имплантата
- В кости D3-D4 финальное сверло должно соответствовать диаметру тела имплантата (3,3 мм)


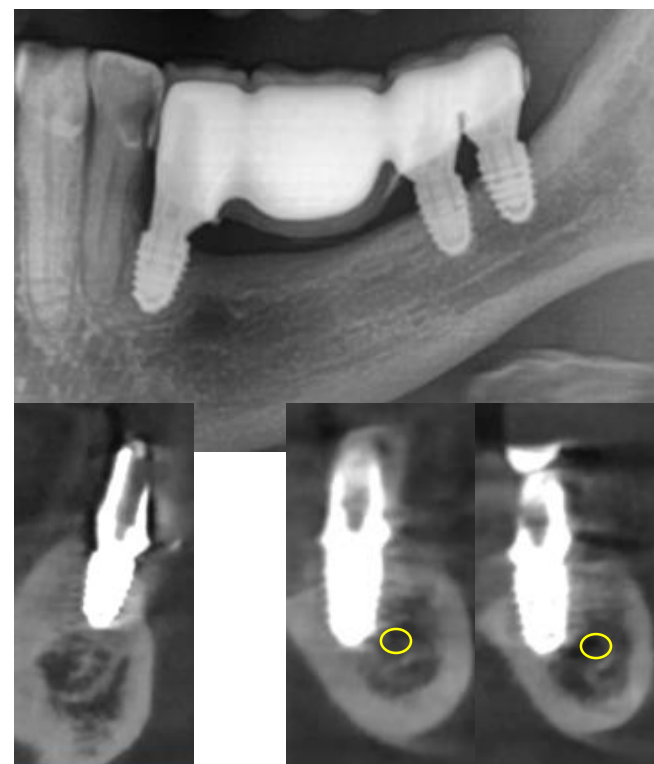
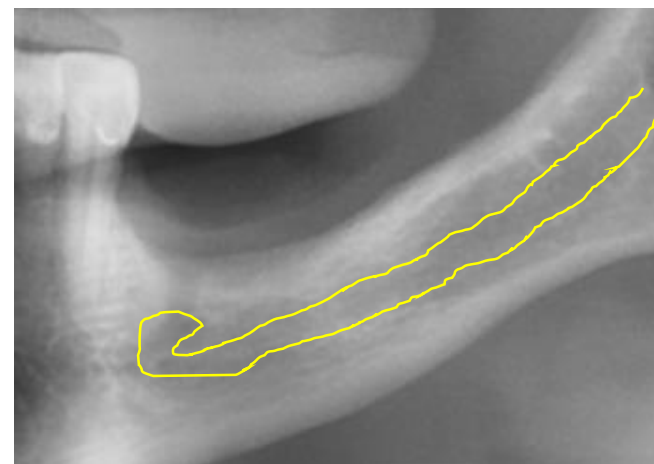
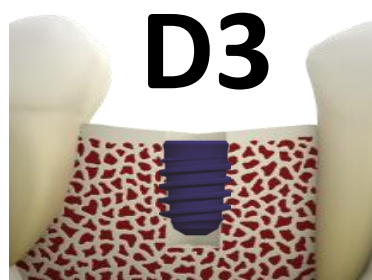
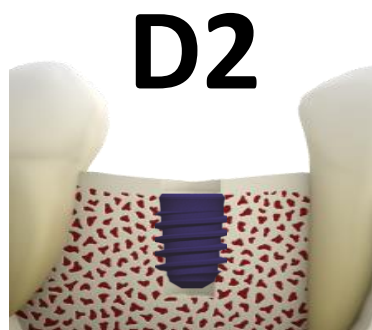
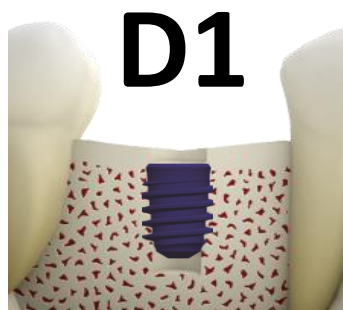
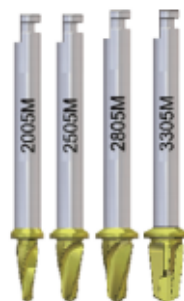


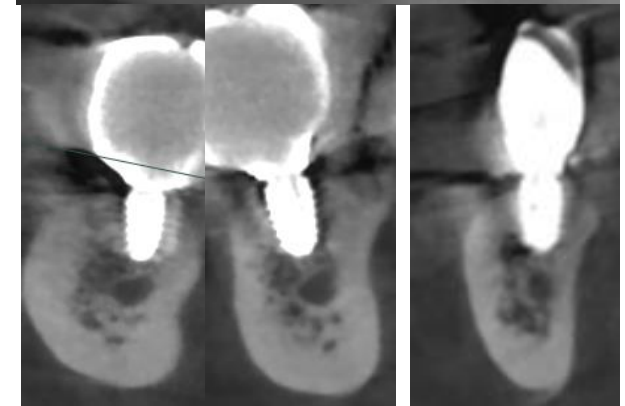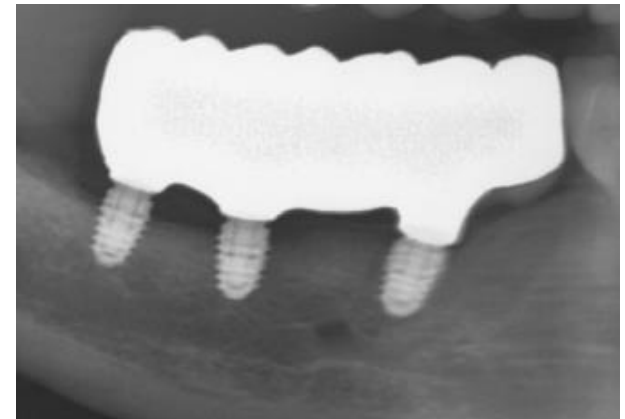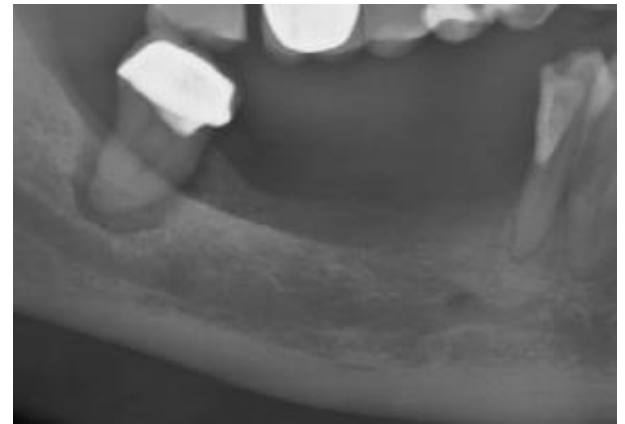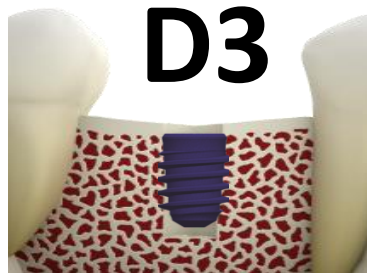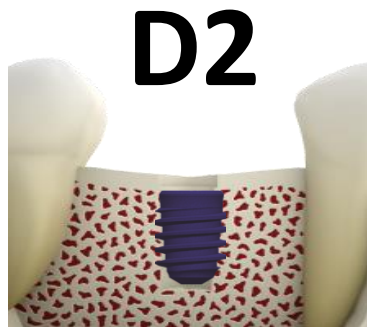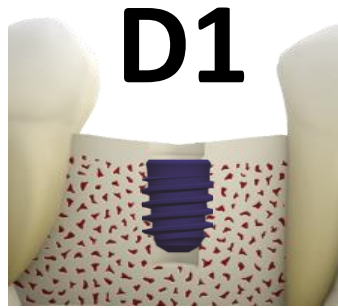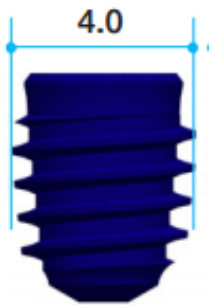

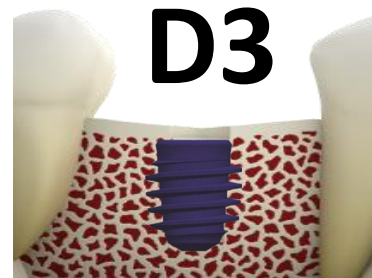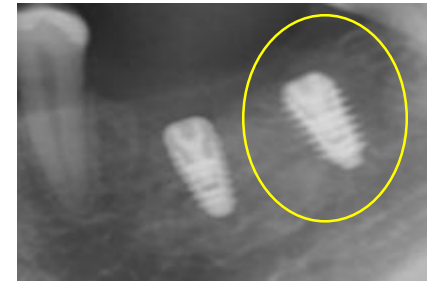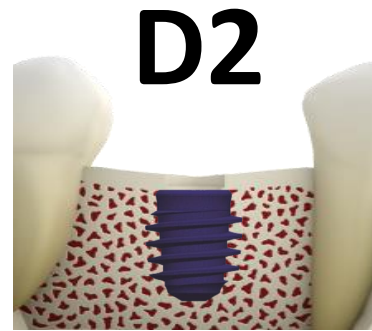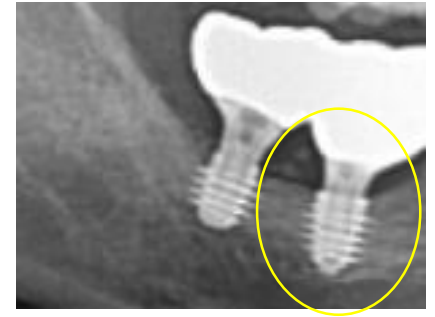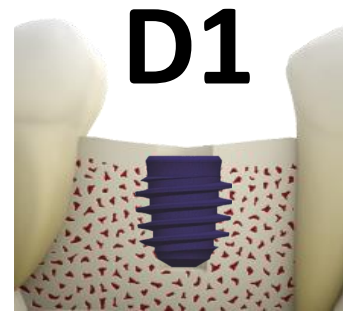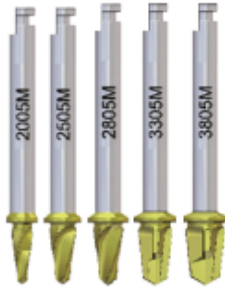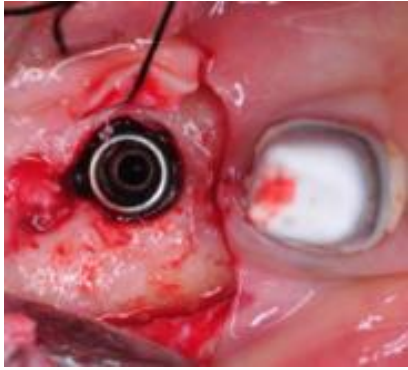

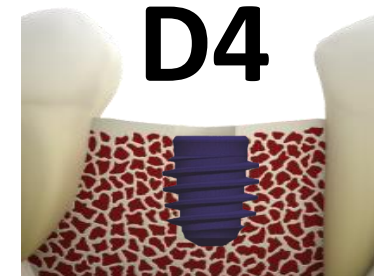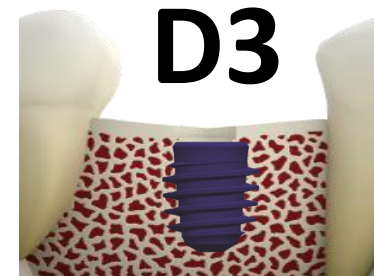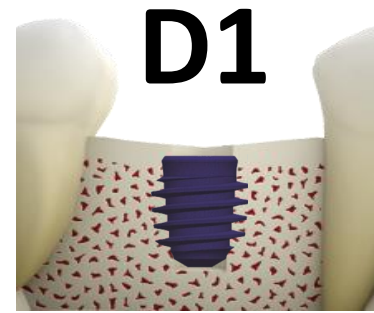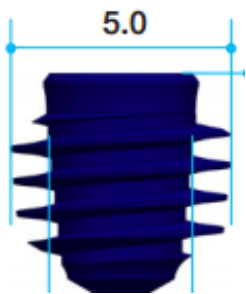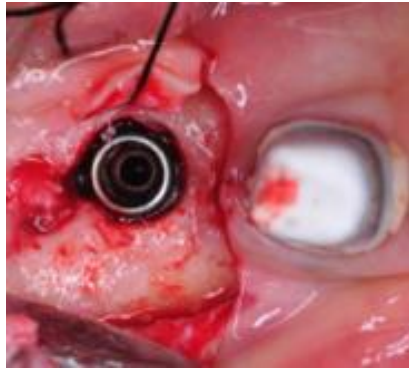

Рекомендации по выбору диаметра имплантата в зависимости от типа костной ткани

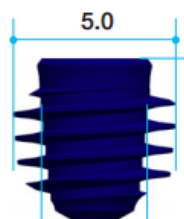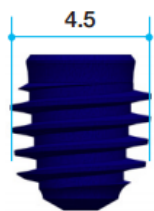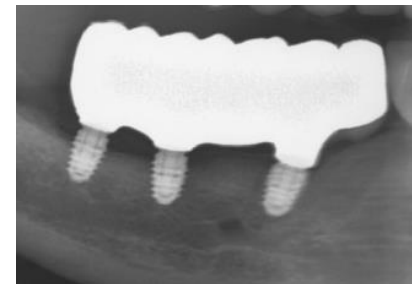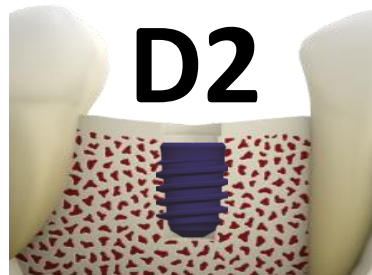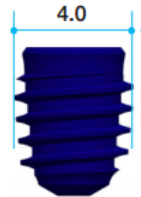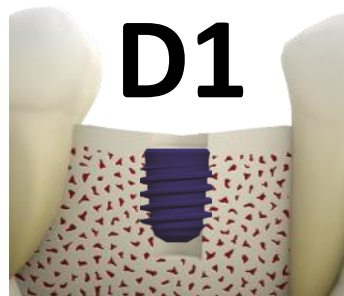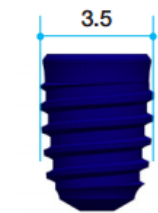


Проведение закрытого синус-лифтинга при установке короткого имплантата AR MF






Специальными сверлами длиной 5,5 мм				
Высота кости 3-4 мм	Формируем ложе под имплантат сверлами не доходя 1 мм до дна гайморовой пазухи (на 2/3 спец сверл L5,5)	Подламываем костный островок остеотомом ImprOst Ø3,8 на 2 мм от первоначальной глубины	Вводим слегка отжатый сгусток Clot-PRF, продвигаем его остеотомом	Вводим имплантат AnyRidge MF Ø 4,5-5,0 со скоростью 20 об/мин и торком 40-50 Нсм

	Приподняли на 3 мм		Образовалась кость 5,5 мм	КЛКТ сразу после операции	КЛКТ через 4 месяца
--	---------------------------	--	---	----------------------------------	----------------------------


Проведение закрытого синус-лифтинга при установке короткого имплантата AR MF

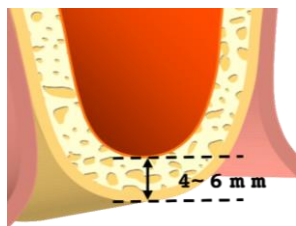

Сверлами из
полного
набора
Эниридж
длиной 7 мм

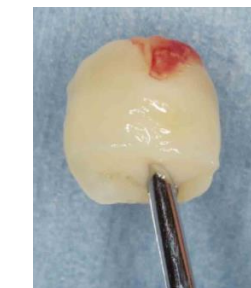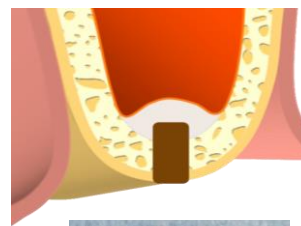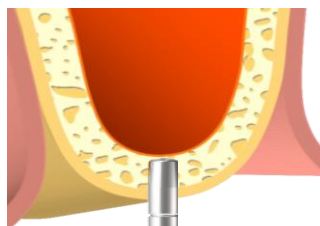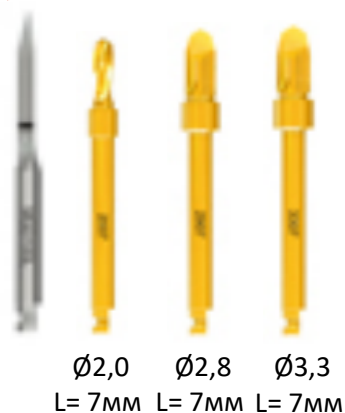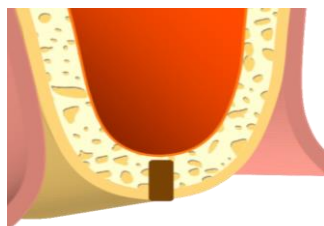


Сгусток Clot-PRF
(стеклянная пробирка
1300 об/мин – 8 мин)

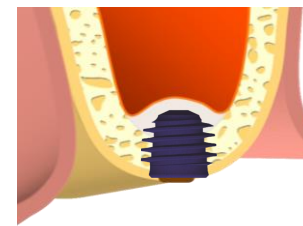


имплантат
AnyRidge MF
Ø 4,5-5,0 и
длиной 5,5 мм




Высота кости 3-4 мм

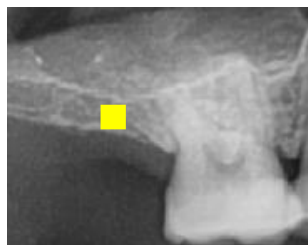


Формируем ложе под
имплантат сверлами не
доходя 1 мм до дна
гайморовой пазухи.
Сверло длиной 7 мм
должно погружаться
чуть меньше половины.

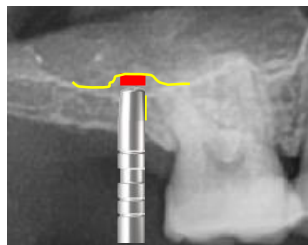


Подламываем костный
островок остеотомом
ImprOst Ø3,8 на 2 мм от
первоначальной глубины

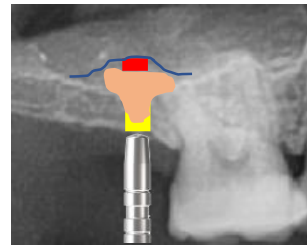

Вводим слегка отжатый
сгусток Clot-PRF,
продвигаем его
остеотомом

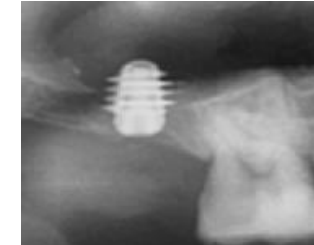

Вводим имплантат
AnyRidge MF Ø 4,5-5,0 со
скоростью 20 об/мин и
торком 40-50 Нсм

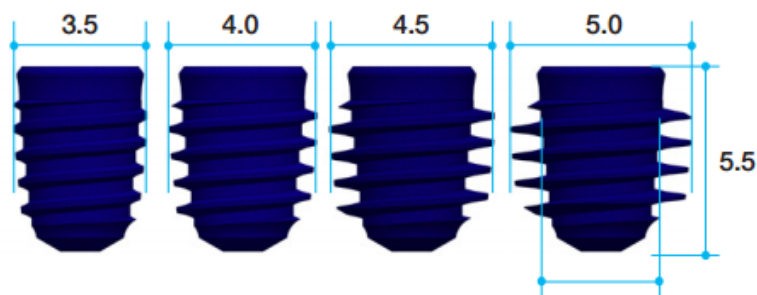


Profile Diameter	Core	Ref.C
Ø3.5	3.3	MX3505
Ø4.0		MX4005
Ø4.5		MX4505
Ø5.0		MX5005



Ложе под сверхкороткие имплантаты также можно формировать с помощью обычных сверел из набора Эниридж

- В кости D1-D2 следует использовать кортикальные фрезы
- В кости D3-D4 при установке имплантатов Ø 4,5-5,0 следует использовать финальное сверло Ø 3,8 мм


Проведение закрытого синус-лифтинга при установке короткого имплантата AR MF

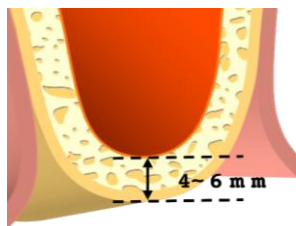



Сверлами из
стартового
набора
Эниридж




Ø2,0 Ø2,8 Ø3,3 Ø3,8

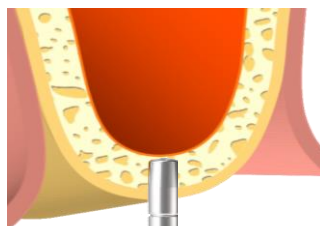

osteотом
ImprOst
Ø3,8

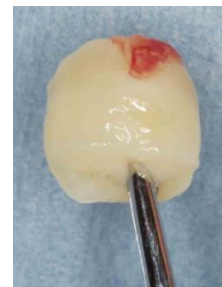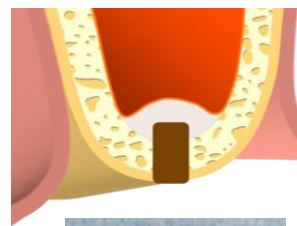


Сгусток Clot-PRF
(стеклянная пробирка
1300 об/мин – 8 мин)

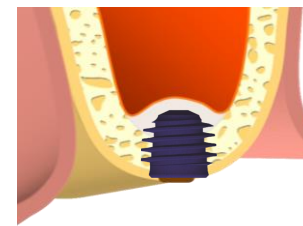


имплантат
AnyRidge MF
Ø 4,5-5,0 и
длиной 5,5 мм




Высота кости 3-4 мм

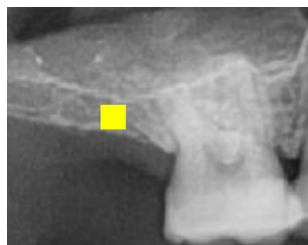


Формируем ложе под
имплантат сверлами не
доходя 1 мм до дна
гайморовой пазухи.
Погружаем только
конусный кончик
сверла.

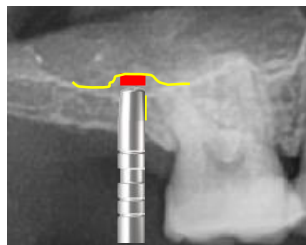

Подламываем костный
островок остеотомом
ImprOst Ø3,8 на 2 мм от
первоначальной глубины

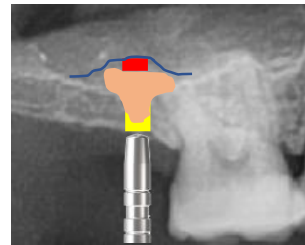


Вводим слегка отжатый
сгусток Clot-PRF,
продвигаем его
остеотомом

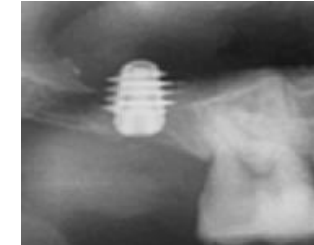


Вводим имплантат
AnyRidge MF Ø 4,5-5,0 со
скоростью 20 об/мин и
торком 40-50 Нсм

Видео №1
Установка коротких
имплантатов с
применением
свёрел 7 мм из
полного набора
Эниридж

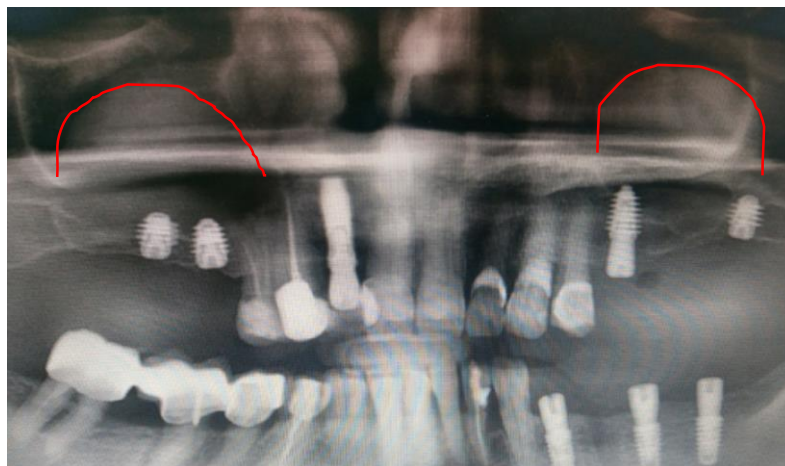


Видео №2
Установка коротких
имплантатов с
применением
длинных свёрел из
стартового набора
Эниридж

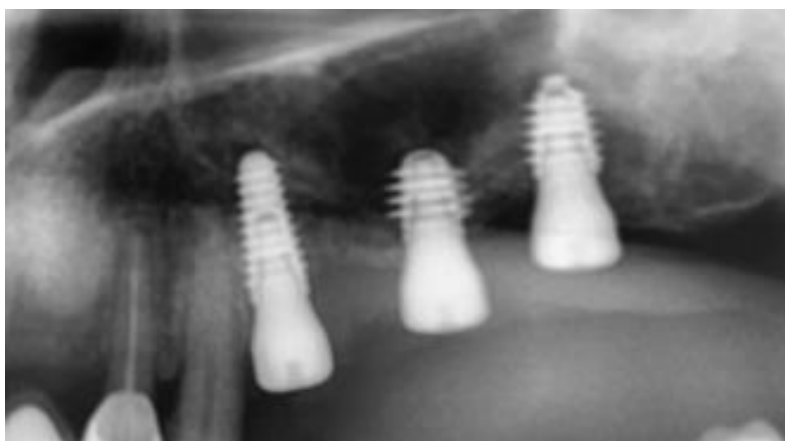

Особенности установки сверхкоротких имплантатов Эниридж на нижней челюсти (плотность костной ткани D1-D2)

■ Имплантат AnyRidge длиной 5.5мм

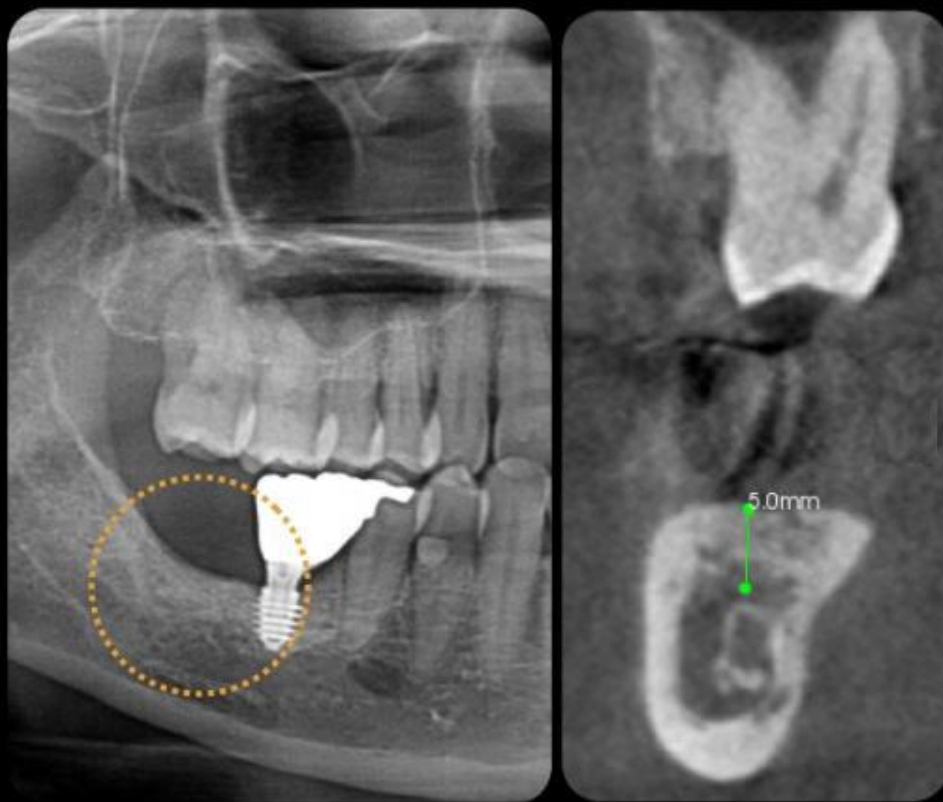


Недостаточная высота кости на нижней челюсти достаточно распространенное явление

Установка стандартного имплантата **невозможна!**

Будет установлен короткий имплантат
AnyRidge 5.5 мм

Остаточная вертикальная высота кости 5мм
*до нижнечелюстного канала 6мм

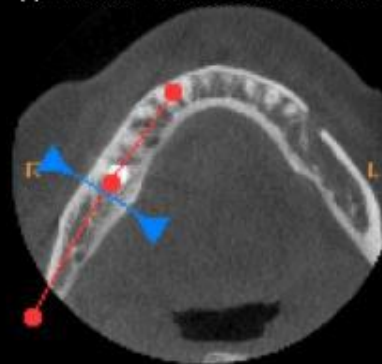


GyeongSan Mir dental hospital.
Lee seung yeup DDS.

■ Имплантат AnyRidge длиной 5.5мм



Специальный хирургический набор со стопперами

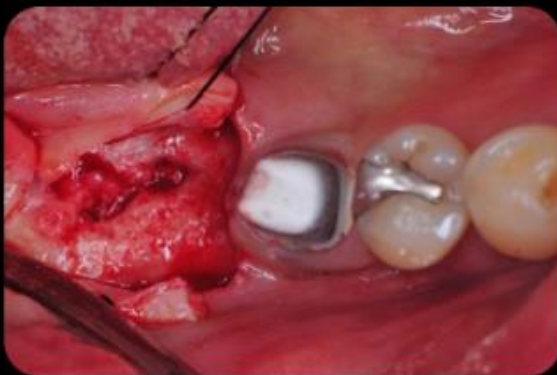


GyeongSan Mir dental hospital.
Lee seung yeup DDS.

Ложе под имплантат нужно формировать того же диаметра, что и диаметр резьбы имплантата

■ Имплантат AnyRidge длиной 5.5мм



Щель между телом имплантата и
стенкой ложа

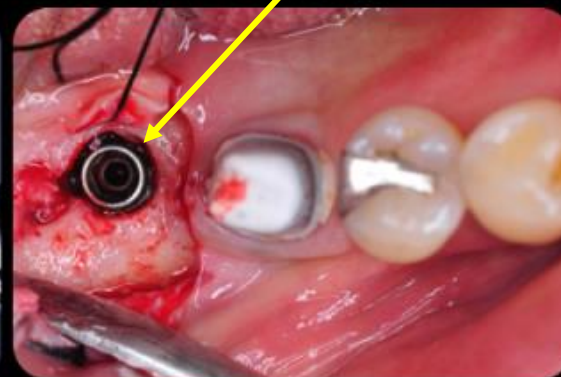

GyeongSan Mir dental hospital.
Lee seung yeup DDS.

Между телом имплантата и стенками сформированного ложа должна оставаться заметная щель

■ Имплантат AnyRidge длиной 5.5мм



Результат



Через 1 год



Результат

Final delivery



Через 1 год

1 year F/u